



Info zur Ermäßigung für Boxerzüchter

Über den Button „Ermäßigung für Boxerbesitzer“ bekommen Sie ab 5 Hunde einen **Rabatt**, bei der Bestellung der **Genetischen Diversität + DLA Haplotypenbestimmung**

Sie gehen folgendermaßen vor:

- sie kommen über den Button „Ermäßigung für Züchter“ auf die Feragen Shop Seite.
- bitte runter scrollen und dann bitte beim Probenmaterial „**Blutprobe**“ anklicken
- weiter unten geben Sie die Menge ein, die Sie bestellen wollen, bei fünf Boxer fügen sie 5 zum Warenkorb, bei sechs Boxer fügen sie 6 zum Warenkorb usw.
- jetzt macht der Warenkorb auf und zeigt den Rabatt an dann auf bestellen und fertig.

Schritt 1

myFERAGEN Account erstellen

Für eine schnelle und reibungslose Testabwicklung registriere Dich zuerst auf unserer Plattform myFERAGEN, erreichbar unter my.feragenlab.com. Hier werden auch sämtliche Testergebnisse für Dich bereitgestellt.

Account erstellen unter:

<https://my.feragenlab.com/login/register>

- Nutzerdaten eingeben
- E-Mail für die Accountaktivierung bestätigen
- Einloggen und los gehts!

Du besitzt bereits einen Account? Einfach unter my.feragenlab.com anmelden und mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 2

Hundeprofil hinzufügen

Nach erfolgreichem Login klicke auf den Button „**Füge deinen ersten Hund hinzu**“, hiermit erstellst du das Profil für deinen Vierbeiner, für welchen du die genetische Analyse durchführen lassen möchtest.

Speichere anschließend die eingegebenen Informationen und gehe weiter zu Schritt 3.

- Klick auf „Füge deinen ersten Hund hinzu“
- Daten deines Vierbeiners eingeben
- Speichere das Profil

Schritt 3

Testkit aktivieren

Nach erfolgreichem Speichern des Hundeprofiles klicke auf den Button „**Testkit aktivieren**“ und folge den einzelnen Schritten. Die benötigten Informationen wie **Testkit-ID** findest Du wie folgt:

Beispiel ID XX000000 Testkit-ID Deine Testkit-ID findest Du:

- Auf der Verpackung des Bürstchens
- Deiner Rechnung
- Auf der ersten Seite dieser Anleitung
- unter support@feragen.at
- oder Telefonisch unter:

0662 / 43 93 83 Festnetz AT bzw.

08654 / 68 24 430 Festnetz DE

Schritt 4

Probenentnahme

Details zur Probenentnahme inklusive einer Schritt-für Schritt-Anleitung findest Du auf unserer Plattform.

Link zum Video & Anleitung

<https://my.feragenlab.com/testkit/how-to>

Wichtiger Hinweis:

Du kannst die Identität deines Tieres verifizieren, indem du die Probe von einem Tierarzt, Zuchtwart oder einer offiziellen Person abnehmen lässt.

Die Probenentnahme durch eine verifizierte Person kann erforderlich sein, damit die Ergebnisse von Zuchtverbänden akzeptiert werden.

Das dafür benötigte Formular findest Du hier:

www.feragen.at/bestaetigung-probennehmer

Schritt 5

Rückversand der Probe

Verpacke das EDTA-Blut in einen Umschlag und sende diesen an uns retour.

Versand aus Österreich

FERAGEN GmbH Strubergasse 26 5020 Salzburg

Versand aus Deutschland

KUBEOS GmbH c/o FERAGEN Niedervillern 8 83410 Laufen

Internationale Sendungen

FERAGEN GmbH Strubergasse 26 5020 Salzburg AUSTRIA

Wenn Du von außerhalb der EU-Proben an uns senden möchtest, findest Du alle benötigten Unterlagen und Zollformulare zum Download unter

www.feragen.at/zoll

